



## NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ OBUVI CE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil naši obuv. Věnujte, prosím, patřičnou pozornost následujícím informacím. Upozorníme Vás na několik skutečností a poradíme Vám, jak se zakoupenou obuví zacházet a udržovat ji tak, aby Vám sloužila k Vaši plné spokojenosti. A Vaše spokojenosť je naším prvořadým cílem.

**Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - letní sandálová vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200111F9** - je určena pro děti od velikostní skupiny 0. Obuv zabezpečuje pevné vedení paty a udržuje chodidlo během růstu ve správném postavení, jež zaručuje normální vývoj skeletu nohy. Obuv je indikovaná k prevenci a léčbě dětských plochých nohy, lze ji však užívat s úspěchem u pacientů s neurologickým postižením, zejména u pacientů se spastickou formou DMO, nebo k doléčení pacientů po operačních zákrocích na chodidlech.

**Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - BABY vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200333FV** - kotníčková, je určena pro děti ve věku do tří let, velikostní skupina 0. Obuv zabezpečuje pevné vedení paty a udržuje chodidlo během růstu v optimálním postavení, jež zajišťuje správný vývoj nohy. Může být využívána v ortopedii, neurologii a rehabilitaci pro celou řadu diagnóz. Má použití v rámci prevence zhoršení vad nohou, jejich léčbě a doléčování po operaci. Obuv lze s úspěchem používat k prevenci plochonoží již u nejmenších dětí.

**Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - zimní vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200444G7** - kotníčková, je určena pro zimní období pro děti ve věku od 2 let. Obuv zabezpečuje pevné vedení paty a udržuje chodidlo během růstu ve správném postavení, jež zaručuje normální vývoj skeletu nohy. Obuv je indikovaná k prevenci a léčbě dětských plochých nohy, lze ji však užívat s úspěchem u pacientů s neurologickým postižením, zejména u pacientů se spastickou formou DMO, nebo k doléčení pacientů po operačních zákrocích na chodidlech.

**Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - celoroční vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200222FK** - je určena k celoročnímu použití pro děti ve věku od 2 let. Obuv zabezpečuje pevné vedení paty a udržuje chodidlo během růstu ve správném postavení, jež zaručuje normální vývoj skeletu nohy. Obuv je indikovaná k prevenci a léčbě dětských plochých nohy, lze ji však užívat s úspěchem u pacientů s neurologickým postižením, zejména u pacientů se spastickou formou DMO, nebo k doléčení pacientů po operačních zákrocích na chodidlech.

Obuv od výrobce DZO s.r.o. je zdravotnickým prostředkem rizikové třídy I. Splňuje požadavky obvyklé jakosti stanovené příslušnými technickými normami platnými v České republice (jsou to: ČSN P 795600 - Obuv - Požadavky a zkušební metody a ČSN 795790 - Obuv - Přijatelné odchyly) a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užiti bezpečná (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích). Je zdravotně nezávadná a splňuje hygienické požadavky prováděcího právního právního předpisu, tj. vyhlášky MZ ČR č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění vyhlášky MZ ČR č. 521/2005 Sb. Očekávaný klinický přínos ZP: zajištění normálního vývoje skeletu nohy. Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty má použití v rámci prevence zhoršení vad nohou, jejich léčbě a doléčování po operaci. Obuv lze s úspěchem používat k prevenci plochonoží již u nejmenších dětí.

### Obecné rady k výběru obuví, informace o používaných materiálech a také zásadách a způsobech ošetřování

**Výběr obuví:** Při výběru obuví dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuví přesně odpovídala vašim potřebám - délka vnitřního prostoru obuví - velikost - má být delší než délka chodidla, prsty by se neměly v žádném případě dotýkat vnitřní strany špičky obuví (tzv. nadměrek). Po návratu domů si obuv ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Nevhodně zvolený druh obuví, velikost, šíře nebo tvar obuví nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Nezapomeňte vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování obuví. Pouze obuv dobře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelovosti obuví. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používání obuví. Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepriznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuví, jako např.: vysoká intenzita užívání obuví (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání obuví k nevhodnému účelu, praní obuví atd. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu obuví a její plné funkčnosti je pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba obuví podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost.

#### Účelovost obuví:

Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuví. Účelovost ovlivňuje volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuví. Berte tedy, prosím, při výběru v úvahu, k jakému účelu chcete obuv používat.

**Vycházková obuv** - je obuv k nošení! po místních komunikacích nebo v místnostech. Vyznačuje se mohutnější a trvanlivější konstrukcí spodku než obuv společenská. Je charakteristická velkou pestrostí střihu a použitých materiálů. Rozlišujeme letní vycházkovou obuv (lehká, vzděšná obuv), celoroční vycházkovou obuv (obu v s konstrukcí přizpůsobenou nošení! v různých klimatických podmínkách, podešev zpravidla dezénovaná) a zimní vycházkovou obuv (obuv s vysokou úrovní tepelné izolační vlastnosti, podešev zpravidla s protiskluzným dezénem).

**Rekreační obuv** - je obuv k nošení při sportovně-rekreačních a sportovně-vycházkových příležitostem, na delší vzdálenosti i v mírném, upraveném přírodním prostředí. Obuv s pevnější konstrukcí svršku a robustnějším spodkem.

**Dětská obuv** - je obuv, na kterou jsou kladený zvláštní nároky. Tyto nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se vyvíjí a roste:

- vyberte obuv, která dobré padne do délky i do šířky, nezapomeňte na nadměrek 10-15 mm
- dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a dostatečně tuhý opatek
- upřednostňujte kotníčkový stříh šňěrovací nebo s páskem na suchý zip
- dětská noha roste velice rychle, kontrolujte proto pravidelně velikost nohy a nošené obuví
- nezapomeňte, že dětská noha se vyvíjí, její kosti jsou měkké a případně nedodržení základních zásad může mít za následek poškození nohy dítěte mnichodynou celý život

**Výrobní způsob** - Další hledisko výrazně ovlivňující funkci a údržbu obuví je výrobní způsob, tzn. způsob, jakým je spojen spodek obuví se svrškem. Firma DZO: používá tzv. lepený výrobní způsob. Obuv lepená - nejčastěji používaná technologie, kdy je spodek obuví ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být negativně ovlivněna promáčením nebo propocením obuví, event. opakováním používání nedostatečně vysušené obuví. Při neopatrné chůzi může dojít k mechanickému uvolnění lepeného spoje (ukopnutí).

**Použitý materiál, jeho údržba a ošetřování:** V současné době se používá velké množství materiálů, od mnoha druhů usní, až po materiály syntetické a textil. Základní znalosti o používaných materiálech, spolu se správným ošetřováním a pečlivou údržbou, prodlužují životnost Vaší obuví.

**Useň (kůže)** - nejčastěji používaný, přírodní materiál s ideálnimi vlastnostmi pro výrobu obuví. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti a je schopna se přizpůsobit individuálnímu tvaru nohy. Useň je charakteristická svou proměnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetických materiálů. Useň není neomezeně odolná působení vlhkosti a to ani z vnější (klimatické vlivy) ani z vnitřní strany (pot).

O usňovou obuv je proto třeba neustále pečovat. Rozeznáváme několik základních druhů usní:

**Hladká useň** - je useň s jemně strukturovaným povrchem s malými pory. Obuv zbytevne nečistot vzhledem kartáčkem nebo měkkým vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Použijte vhodný krém požadovaného odstínu a vyleštěte. Rovněž lze použít speciální samolešticí emulze nebo samolešticí houbičky.

**Laková useň** - je useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usní. Její povrch je velmi chouloustivý na mechanické poškození, c hemické vlivy, rozmáčkení! a mráz. Nečistoty z povrchu usní odstraňte jemným vlhkým hadříkem, povrch ošetřete krémem či sprejem na lakové usní.

**Nubuk, velur (semiš)** - je useň broušená po líc nebo po rubu. Obuv z tohoto materiálu ošetrujte prýžovým kartáčkem a přípravky, které jsou určené pro vlasové usní. Tyto přípravky oživují barvu a mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto usní nikdy nekrémujte!

**Povrstvená useň (povrstvená kůže)** - je useň, která má na povrchu nanesenou či připojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako laková useň.

Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha nebo použijte prostředky určené k ošetření syntetických materiálů.

**Textil** - používá se na lehké, často letní nebo domácí obuv. Textilní obuv ošetřujte za sucha kartáčováním a čističkami spreji na textil , které obuv impregnují, oživí barvy a zamezí ušpinění.

**Syntetické materiály** - plasty, koženky, porometry - tyto materiály vzhledem často připomínají useň, ale jejich vlastnosti nedosahují kvality přírodních usní. Tato obuv je velmi nenáročná na údržbu. Omývejte ji vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete do sucha. Pryž - obuv omývejte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a vytřete do sucha.

#### Další zásady správného udržování a ošetřování obuví:

- při obouvání obuví, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvaci lžíci, po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti střídejte často obuv, zejména v deštivém počasí (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv) obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a využívat (i s vyjmutou vkládací stélkou) používání nedostatečně vysušené obuví její nadměrné opotřebení (zvláště stélka a podšívek)
- ushíváv obuv i obuv z broušených usní (samozřejmě také obuv ze syntetických materiálů a textilu) není v žádném případě neomezeně odolná proti vlhkosti - vhodnou impregnaci pouze zvýšujeme její odolnost proti vnější vlhkosti
- obuv z hladké usní před prvním použitím! nainregnujte a následně nakrémujte, další impregnaci či krémování provádějte podle potřeby
- vyvarujte se rozmáčení obuví, které poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar obuví
- promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty
- nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní useň
- textilní ani jinou obuv zásadně nedoporučujeme práť v pračce za použití saponátových prostředků
- včasného základního údržbu nebo výměnu opotřebovaných patníků, podešev (příp. podrážek), vkládacích či vlepovacích stélk nebo šněrovadel zabráníte poškození dalších součástí Vaší obuví; toto případné poškození nemůže být důvodem k reklamaci.

Ve specializovaných prodejnách s obuví najdete široký sortiment výrobků k ošetřování a údržbě všech druhů obuví. Důsledně dodržujte návod k použití uvedený na těchto výrobcích.


Jakákoliv závažná nežádoucí přihoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz)).

V případě pochybností o vhodnosti obuví k dalšímu nošení, obraťte se na místo kde jste obuv převzali. V případě pochyb o vhodnosti vybrané obuv vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu, obraťte se prosím na předepsujícího lékaře. **Přejeme Vám pohodlnou chůzi v naší obuví.**

Použitou obuv likvidujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Datum vydání: 3.5.2021, revize 1.0

**DZO s.r.o.**   
U Dvora 1083  
686 05 Uherské Hradiště  
IČO: 26227754 DIČ: CZ699000013

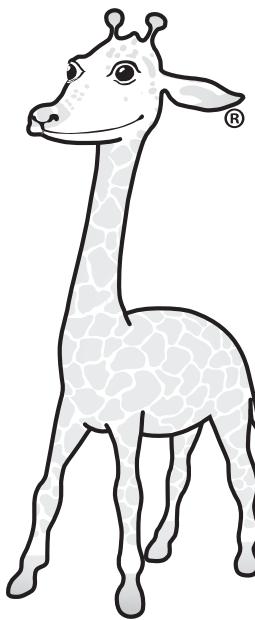

# Zdravotně nezávadná obuv

**Značka „Žirafa“ je signálem pro rodiče dětí, že obuv byla dobrovolně certifikována a je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná.**

**Značka „Žirafa“ garantuje:**

- hodnocení dětské obuvi v Komisi pro zdravotně nezávadné obouvání;
- celkové ortopedické hodnocení dětské obuvi a zejména její konstrukce;
- zdravotně nezávadné a nealergizující materiály použité na výrobu obuvi;
- kvalitní konfekční zpracování dětské obuvi;
- odzkoušení všech vzorků obuvi dle stanovených parametrů v nezávislé zkušebně;
- rozměrovou proporcionalitu a správné označení obuvi.



**ČESKÁ  
KVALITA**

Důvěryhodnost značky potvrzuje rovněž přijetí do programu Česká kvalita.

**Program Česká kvalita garantuje spotřebitelům:**

- kvalitu výrobků (služby) - ověřila nezávislá zkušebna;
- kvalita je průběžně kontrolovaná;
- je ověřována spokojenost zákazníků s výrobkem či službou;
- program Česká kvalita je garantován vládou ČR.